



Système plafonnier Likorall



Likorall 242, sûr et fiable.

Likorall, systèmes plafonniers de lève-personnes


Le système plafonnier de lève-personnes Likorall a prouvé ses qualités depuis des années. D'un design convivial, Likorall est équipé d'un puissant moteur qui peut soulever des charges jusqu'à 200 kg (230 kg pour le modèle 243). Le secteur médical a de plus en plus besoin de capacités de levage supplémentaires, Likorall répond ainsi à cette demande. L'électronique moderne permet aussi de répondre aux exigences sans concessions en matière de sécurité, de fiabilité et de convivialité.

Les divers modèles d'étriers et de harnais interchangeables rendent possibles les situations de levage les plus difficiles. Résultat: un meilleur confort pour le patient, le dos du personnel soignant est moins sollicité, des soins de meilleure qualité et une économie des frais de soins. Toutes les commandes électroniques sont installées sur un seul et même côté de l'installation, elles sont ainsi faciles d'accès pour les activités de service et d'entretien.



Likorall 242ES et Likorall 242ES-R2R

Système permettant de déplacer un patient d'une pièce à l'autre, et d'un rail à l'autre, sans avoir besoin de créer d'ouverture au-dessus de la porte.

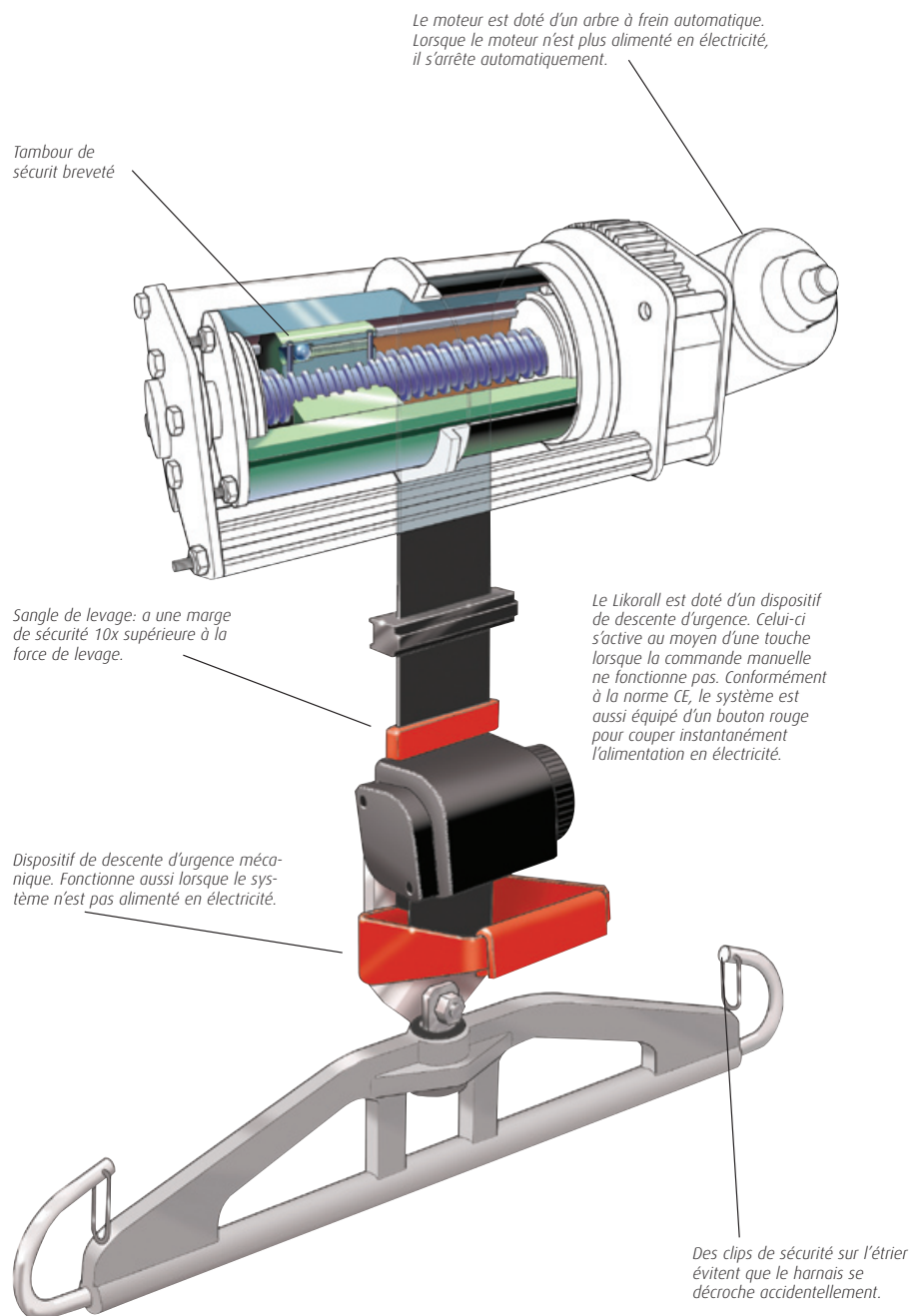

Liko Likorall



Exemples de modèles de harnais-vestes.
Pour enfants et adultes.

Spécifications



Fixation au plafond



Rehaussement du rail



Aiguillage de rail



Dispositif multidirectionnel électrique



Likorall avec moteur d'appoint électrique



Capacité 400 kg



Étrier à huit bras avec stabilisateur



Station de chargement sur le rail



Exemple de système d'une pièce à l'autre



Crochet de stationnement avec mode d'emploi




Télécommande à infrarouges



Crochet Quick release



Slimline (fixation murale esthétique)

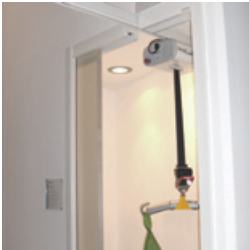

Prolongement de rail avec porte coulissante

Liko Multirall



Multirall 200

Le Multirall est un système encore plus polyvalent que les autres systèmes plafonniers. Grâce au crochet Quick Release de Liko, ce système de rail est multi fonctions et ne nécessite aucun outil. Tous les étriers et harnais Liko peuvent être utilisés sur le Multirall et répondent à vos besoins d'utilisation.



1e situation: Un système plafonnier normal

Accrochez le Multirall sur le système de rail, choisissez un étrier et un harnais, le lève-personne est maintenant prêt à l'emploi.

2e situation: Un système plafonnier portable et pratique pour utilisation occasionnelle

Placez le moteur sur un rehaussement, dégagez suffisamment la sangle du moteur de façon à ce qu'elle puisse être reliée au chariot sur les rails, le Multirall est maintenant prêt à l'emploi.

3e situation: Passage d'une pièce à l'autre

Accrochez le Multirall comme pour la 2e situation. À l'aide d'une sangle de rallongement et plusieurs chariots sur les rails d'autres pièces, Multirall devient un lève-personne permettant de passer d'une pièce à l'autre, d'un rail à l'autre. Le lève-personne peut ainsi être installé dans la pièce de votre choix. Une solution facile et sûre!

Charge maximum: 200 kg.



1e situation



2e situation



3e situation



Pèse personnes digitale amovible grâce au crochet Quick release

Grand choix d'accessoires

Les divers accessoires vous aident à résoudre les situations de levage les plus difficiles. Résultat: un meilleur confort pour le patient, le dos du personnel soignant est moins sollicité, des soins de meilleure qualité et une économie des frais de soins.



Utilisé comme moteur amovible et portable



Utilisé comme moteur fixe



Crochet Quick release



Clip de sécurité



Bras d'assistance



Chariot de transport



Spécifications techniques

Likoall 242/243/250

- Capacité de levage: Likoall 242: 200 kg.
Likoall 243: 230 kg.
Likoall 250: 250 kg.
- Vitesse de levage: 5 cm/s sans charge.
- Portée de levage: 210 cm.
- Moteur: 24 V, 10 A.
- Batteries: 2 batteries plomb-acide rechargeables 12 V, 2,6Ah, à régulation par soupape.
- Chargeur: intégré 100-240 V, 40-60 Hz, max 0,6 A.
- Vitesse de levage: 15 cm/s.
- Indice de protection: IP 43.
- Matériau: aluminium anodisé.
- Descente d'urgence: mécanique et électrique.
- Intervalle: Int./utilisation 10/90, utilisation active 6 minutes max.
- Le Likoall 242 est classé dispositif technique médical de classe 1, selon la directive européenne MDD93/42/CEE.
Le Likoall est conforme aux normes IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-2601-1 et CAN/CSA C22.2 N° 606.1.

Multirall 200

- Capacité: 220 kg.
- Batteries: 2 x 12 V 2,6 Ah.
- Chargeur: 100-240 VAC 40-60 Hz.
- Vitesse de levage: 6 cm/s sans charge.
- Portée de levage: 160 cm.
- Caractéristiques électriques: 24 V, 7 A.
- Dimensions moteur: 150 x 185 x 280 mm (LxHxP).
- Poids: 8,5 kg avec batterie (2kg).
- Coffret moteur: ABS/PC VO.
- Descente d'urgence: électrique et mécanique.
- Charge maximum: 200 kg.
- S'utilise à l'intérieur uniquement.
- Niveau de protection contre les chocs électriques: type B.
- Équipement de classe II.
- Indice de protection: IP 30.
- La sangle du Multirall a une marge de sécurité décuplée (x10) et un tambour de sécurité avec système anti chute.
- Multirall est classé dispositif technique médical de classe 1. Multirall est conforme aux normes 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-2601-1 et CAN/CSA C22.2 N° 606.1.

